



SDÜDHF/TBH/TLM/46/YT-27.11.2014/REVNO-00

1. AMAÇ ve KAPSAM

1.1.1. Donanımın amacına uygun etkili bir şekilde kullanımını sağlamak.

2. SORUMLULUK

2.1.1. Bu donanımın kullanımıyla ilgili sorumluluk yetkili kişiye aittir.

3. UYGULAMA

3.1.1. Koter donanımın 0-1 konumundaki düğme 1 konumuna getirilerek açılır.

3.1.2. Donanımın plak işareti olan kısmına koter plağı kablosu takılır ve kablunun diğer kısmına plak yerleştirilir

3.1.3. Plak hastanın cerrahi bölgesinden uzak uygun kısmına yapıştırılır.

3.1.4. Plak hastaya yapıştırıldıktan sonra donanımın ön panelinde donanım kullanıma hazır uyarısı gelmesi gereklidir. Plak hastaya uygun şekilde bağlanmamış ise 'plak takılı değil' veya 'ikaz ışığı' yanar.

3.1.5. Donanımın ön kısmında Monopolar ve Bipolar kullanım için giriş kısımları vardır.

3.1.6. Monopolar kullanım için koter kalem, bipolar kullanım için bipolar kablo ve bipolar forseps aletinin olması gerekir.

3.1.7. Monopolar kullanımda 'Cut' ve 'Coagulasyon' bölümleri bulunur. Yukarı aşağı tuşları ile cut ve coagulasyon şiddeti ayarlanır.

3.1.8. Bipolar kısmı kullanılacak ise bağlantı kablosu takılır ve bipolar kısmının çalışması için gerekli ayak pedalının kotere bağlantısı gerçekleştirilir.

3.1.9. Koter donanımına aşırı yüklenme olduğu zaman koter donanımı alarm verir. Bu konumda iken donanımı tekrar kapatıp açmak gerekir.

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

DÖKÜMAN DURUMU

- KONTROLLÜ KOPYA
 KONTROLSÜZ KOPYA
 İPTAL/...../.....