



SDÜDHF/TBH/TLM/19/YT-26.09.2014/REVNO-00

1. AMAÇ ve KAPSAM

Donanımın amacına uygun etkili bir şekilde kullanımını sağlamak.

2. SORUMLULUK

Bu donanımın kullanımıyla ilgili sorumluluk yetkili kişiye aittir.

3. UYGULAMA

- Donanım açılır.
- Bowic dick testi yapılır.
- Test başarılı ise donanım kullanıma hazırdır.
- Cerrahi alet ve bohçalar 134 °C uygun menüde çalıştırılır.
- Hassas cerrahi aletler 121 °C uygun menüde çalıştırılır.
- Atılan yüke göre 121 °C lik veya 134 °C lik indikatör konulur.
- Setler ve bohçalar çıktığında indikatörün dönüp dönmediği kontrol edilir. İşlem başarılıysa setler kullanıma hazırdır.

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

DÖKÜMAN DURUMU

- KONTROLLÜ KOPYA
 KONTROLSÜZ KOPYA
 İPTAL/...../.....