



PANORAMİK RÖNTGEN CİHAZI KULLANMA TALİMATI

SDÜDHF/TBH/TLM/06/YT-26.09.2014/REVNO-00

1. AMAÇ VE KAPSAM

1.1. Cihazın doğru kullanımını sağlayarak kullanım ömrünü uzun vadede tutmak

2. GÖREV VE SORUMLULUK

2.1. Radyoloji Teknikerleri
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı Başkanı

3. TALİMATIN DETAYI

- 3.1. On-off düğmesine basılarak cihaz açılır.
- 3.2. Elektrik akımı ve cihaz üzerindeki ve cihaza ait parçalar kontrol edilir.
- 3.3. Dijital panoramik röntgen cihazında cihaza bağlı bilgisayarda hastanın bilgileri kaydedilir.
- 3.4. Konvansiyonel panoramik röntgen cihazında içine film yerleştirilmiş kaset yerine takılır. Dijital panoramik röntgen cihazında kaset konmaz.
- 3.5. Radyografi işleminin çeşidine bağlı olarak hastanın cihazdaki konumu belirlenir.
- 3.6. Kurşun bariyer arkasına geçilir, tuşlama butonuna basılarak hastanın filmi çekilir.
- 3.7. Mesai bitiminde on-off düğmesine basılarak cihaz kapatılır.

4. REFERANSLAR

4.1. Cihaza ait kullanım kılavuzu

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

DÖKÜMAN DURUMU

- KONTROLLÜ KOPYA
 KONTROLSÜZ KOPYA
 İPTAL/...../.....