



**MERKEZİ
STERİLİZASYON ÜNİTESİ**

**STERİL MALZEME
DEPOLAMA KULLANMA
TALİMATI**

SDÜDHF/TBH/TLM/73/YT-16.01.2015/REVNO-00

1. AMAÇ

1.1. Steril edilen malzemenin uygun şekilde, uygun sürelerde muhafazasını ve kullanımını sağlamak

2. KAPSAM

2.1. MSÜ çalışanları

3. TALİMAT

3.1. Steril malzemeler kullanıcıya teslim edilmeden önce steril alanda depolanır.

3.2. Bu alandaki raflar tavandan 30-50 cm aşağıda, yerden 20-30 cm yukarıda ve duvardan 5 cm uzaklıkta olmalıdır.

3.3. Ortam ısısı 18-22 derece ,ortam nem oranı %30-%60 arasında olmalıdır.

3.4. Malzemeler “ ilk giren ilk çıkar” kuralına göre kullanılır.

3.5. Otoklavdan çıkan steril malzemeler nem açısından değerlendirilir ve sadece tamamen kuru olanlar bölüm raflarına yerleştirilir.

3.6. Setler raflara ağır olanlar altta, hafif olanlar üstte olacak şekilde yerleştirilir.

3.7. Setlerin sterilizasyon tarihleri her gün kontrol edilir.

3.8. Malzemelerin raf ömürleri aşağıdaki şekildedir:

3.8.1. Çift kat kumaş: 30 gün

3.8.2. Çift Kat krepe kağıdı: 30 gün

3.8.3. Paketler: Buhar sterilizasyon sonrası 6 ay ,

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

DÖKÜMAN DURUMU

- KONTROLLÜ KOPYA
 KONTROLSÜZ KOPYA
 İPTAL/...../.....