



**MERKEZİ
STERİLİZASYON ÜNİTESİ**

**ULTRASONİK YIKAMA
CİHAZI ÇALIŞTIRMA
TALİMATI**

SDÜDHF/TBH/TLM/76/YT-16.01.2015/REVNO-00

1. AMAÇ

1.1. Ultrasonik yıkama cihazının doğru çalıştırılması ve kullanımını sağlamak

2. KAPSAM

2.1. MSÜ çalışanları

3. TANIM

3.1. Özellikle lümenli alet ve mikro cerrahi aletlerinin üzerindeki organik maddelerin belli bir sıcaklıkta (45- 50 C° de), ultrasonik dalgalar ile mekanik temizliğinin yapılması

4. TALİMAT

4.1. Sıvı tankı işaretli yere kadar doldurulur

4.2. Sıvı içine koyulacak enzimatik solüsyon miktarı üretici firma önerileri doğrultusunda eklenir .

4.3. Cihazın güç düğmesi açılır.

4.4. Kalibrasyon düğmesine basılarak 5 dk kalibrasyonu sağlanır.

4.5. Yıkama zamanı düğmesine basılarak istenen süre ayarlanır (5-10 dk)

4.6. Dijital göstergedeki ısı 45 C°'ye ayarlanır

4.7. Delikli yıkama sepetine malzemeler fazla yüklemeye yapılmadan yerleştirilir.

4.8. Geniş yüzeyli büyük cihazlar ultrasonik dalgaları engelleyeceğinden sepetin alt kısmına yerleştirilir.

4.9. Cihaz yüzeyine cerrahi aletler kesinlikle değmemelidir.

4.10. .Kapaklı malzemelerin kapakları açılarak cihaza yerleştirilir.

4.11. İşlem yapılacak malzemenin tamamı sıvı içinde olmalıdır.

4.12. Kapak kapatılarak başlat düğmesine basılır.

4.13. Yıkama süresi bitiminde malzemeler akan suyun altında bolca durulanır.

4.14. Lümen içleri kontrol edilir edilir, kirlilik var ise fırça yardımı ile temizlenir ve basınçlı su ve hava geçirilerek yumuşak bir bez ile kurulanır.

4.15. Ultrasonik yıkama cihazının sıvısı kirlendikçe ve de üretici firmanın önerdiği sürelerde değiştirilir

4.16. İçindeki sıvıyı boşaltmak için su tahliye vanası açılır.

4.17. Her solüsyon değişim sonrası boşaltılan tankın içi dezenfektan solüsyon ile ıslatılmış bez ile silinir.

4.18. Çalışırken cihazın içine asla el sokulmamalıdır.

4.19. Çalışmadığı zamanlarda cihaz elektrik fişinden çıkarılmalıdır.

Ultrasonik Yıkama Makinelerinin Temizliği:

- Cihaz ve cihazın bulunduğu raf kullanım aralarında kontaminasyon varsa dezenfektanla ıslatılmış bezle silinir..
- Yeni solüsyon hazırlanmak üzere boşaltıldığında, tankın içi dezenfektan solüsyonla ıslatılmış bezle ile temizlenir.
- Ultrasonik Yıkama Makinelerinin Temizliği üretici firmanın önerileri doğrultusunda yapılır.

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

DÖKÜMAN DURUMU

- KONTROLLÜ KOPYA
 KONTROLSÜZ KOPYA
 İPTAL/...../.....