



DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEZENFEKSİYONU VE STERİLİZASYON TALİMATI

SDÜDHF/TBH/TLM/24/YT-19.10.2014/REVNO-00

1. Eldiven giyilir.
2. Ölçü kaşıkları aljinattan temizlenir.
3. Aljinattan arındırılan kaşıklar, kirli kaşık kabında toplanır
4. Tezgah üstündeki aljinat ve diğer atıklar toplanır , hazırlanan hipokloritli solüsyonda bekletilerek evsel atık kovasına atılır.
5. Tezgah üstü silinir, dezenfektan madde ile dezenfeksiyonu sağlanır ve kurulanır.
6. Akrilik Polimerizasyon Fırını, Mum Eritme Cihazı, Cila Makinesinin günde iki kez temizliği ve dezenfeksiyonu sağlanır.
7. Gün içinde toplanan kaşıklar, kirli kaşık kabında sterilizasyona indirilerek sterilizasyonu sağlanır.
8. Steril edilen kaşıklar, sterilizasyon ünitesinden polikliniklere dağıtılır.
9. Laboratuardaki boll ve boll kaşıkları su ile yıkanır, kurulanır. Her işlem sonrası dezenfeksiyonu sağlanır.
10. Hastadan alınan 1. ve 2. ölçüler hekim tarafından ölçü alındıktan sonra ağız içi sekresyonu vb. salgılardan arındırılmak amacıyla musluk suyundan geçirilip ölçü sprej dezenfektanı ile dezenfeksiyonu gerçekleştirilir poşete konarak taşınması sağlanır.
11. Laboratura gelen ölçülere diş teknisyenleri tarafından ölçü sprej dezenfektanı sıkılır.

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

DÖKÜMAN DURUMU

- KONTROLLÜ KOPYA
 KONTROLSÜZ KOPYA
 İPTAL/...../.....