



SDÜDHF/TBH/TLM/16/YT-26.09.2014/REVNO-00


1. AMAÇ ve KAPSAM

Donanımın amacına uygun etkili bir şekilde kullanımını sağlamak.

2. SORUMLULUK

Bu donanımın kullanımıyla ilgili sorumluluk yetkili kişiye aittir.

3. UYGULAMA

- EKG elektrotlarının bağlanacağı vücut bölgeleri su veya jel ile ıslatılır.
- Fiş girişlerini kontrol edilir.
- ON Düğmesine basılır.
- Parazit düğmesine basılır. 
- Ayar düğmesine basılır. (Ekranı ½ çıkacak)
- Başlat düğmesine basılır. (sağ alt köşe)
- Donanım kullanım dışında ise şarjda takılı kalır.

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

DÖKÜMAN DURUMU

- KONTROLLÜ KOPYA
 KONTROLSÜZ KOPYA
 İPTAL/...../.....