



HEPATİTLİ HASTALAR İÇİN ÜNİT TEMİZLİĞİ TALİMATI

SDÜDHF/TBH/TLM/29/YT-19.10.2014/REVNO-00

Ünit temizliği ve dezenfeksiyonu klinikte çalışan poliklinik çalışanı tarafından bu şekilde yapılmalıdır.

1. Klinik çalışan personeli tarafından kullanılan tüm el aletleri ve aeratör, mikromotor veya cavitron başlığı gibi mekanik aletler temizlenip dezenfektanlandıktan sonra sterilizasyon ünitesine teslim edilir.
2. Ünit temizliği temiz alandan kirli alana doğru yapılmalıdır
3. Firma önerileri doğrultusunda uygun miktarda hazırlanan klor tablet solüsyonuyla ünit temizlenir ve kurulanır
4. Kreşuar içi çamaşır suyu ile akıtılarak fırça yardımıyla yıkanır.
5. Kreşuar kenarları tek kullanımlık gazlı bez ile hızlı yüzey dezenfektanı ile silinir.

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

DÖKÜMAN DURUMU

- KONTROLLÜ KOPYA
 KONTROLSÜZ KOPYA
 İPTAL/...../.....