



SDÜDHF/TBH/TLM/56/YT-13.01.2015/REVNO-00

## 1. AMAÇ VE KAPSAM

1.1. Cihazın doğru ve verimli kullanılmasını sağlamak, hastanedeki tüm cihazları kapsar.

## 2. GÖREV VE SORUMLULUK

2.1. Doktor, hemşire, sağlık memurları ve eğitim almış hastalar.

## 3. TALİMATIN DETAYI

3.1. Eller yıkanır.

3.2. Parmak delme aleti üretici firmanın talimatına uygun şekilde kullanılır ve işlem için hazırlanır. ( her kullanımda yeni iğne ve lanset kullanılır. )

3.3. Eğer kalibrasyon gerektiren bir makine ise; strip kutusunda tanıtıcı kalibrasyon çubuğu çıkar, makineye takarak striplerin kodu makineye yüklenmelidir.( her strip kutusu kendine özel kalibrasyon gerektirir.)

3.4. Strip kutusundan yeni strip çıkardıktan sonra kutusunu hemen kapatın .

3.5. Ölçüm stripinin işaretli yönü makine yuvasına yerleştirilir.

3.6. Cihaz ekranda görülen strip koduyla kutunun üstündeki kodun uyup uymadığı kontrol edilir.

3.7. Ekranda kandamlaşma sembolü çıktığında ölçüme hazırsınız demektir.

3.8. Parmak delme aletinizi kullanarak Parmağınızı delip bir damla kan çıkartınız.

3.9. Strip üzerindeki kan değdirilmek için belirlenmiş kısma kana temas ettirilir.

3.10. Cihazdan tamam sinyali geldiğinde parmak uzaklaştırılabilir.

3.11. Bir süre sonra ekranda görünen değer hastanın kan şekeri sonucudur. ( makinenin belleğinde de bir süre kayıtlı kalır.)

3.12. Bu sonuç mg / dl ya da mmol / L cinsinden olabilir. Bu makine ayarlarında düzenlenebilir.

3.13. Sonuç kayıt edilir.

3.14. Cihaz temizlenir ve kaldırılır.

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

DÖKÜMAN DURUMU

- KONTROLLÜ KOPYA  
 KONTROLSÜZ KOPYA  
 İPTAL ...../...../.....