



# PERİAPİKAL RÖNTGEN CİHAZI KULLANMA TALİMATI

SDÜDHF/TBH/TLM/07/YT-26.09.2014/REVNO-00

## 1. AMAÇ VE KAPSAM

1.1. Cihazın doğru kullanımını sağlayarak kullanım ömrünü uzun vadede tutmak

## 2. GÖREV VE SORUMLULUK

2.1. Radyoloji Teknikerleri  
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı Başkanı

## 3. TALİMATIN DETAYI

- 3.1. On-off düğmesine basılarak cihaz açılır.
- 3.2. Elektrik akımı ve cihaz üzerindeki ve cihaza ait parçalar kontrol edilir.
- 3.3. Dijital periapikal röntgen cihazında cihaza bağlı bilgisayarda hastanın bilgileri kaydedilir.
- 3.4. Cihaz üzerinde her hastaya ve dişe uygun ayarlamalar (diş numarası, hasta tipi, doz ayarı) yapılır.
- 3.5. Radyografi işleminin çeşidine bağlı olarak film hasta ağızına yerleştirilir.
- 3.6. Radyografi işleminin çeşidine bağlı olarak periapikal röntgen cihazının başı hastaya göre açılı verilerek konumlandırılır.
- 3.7. Kurşun bariyer arkasına geçilir, tuşlama butonuna basılarak hastanın filmi çekilir.
- 3.8. Mesai bitiminde on-off düğmesine basılarak cihaz kapatılır.

## 4. REFERANSLAR

4.1. Cihaza ait kullanım kılavuzu

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

DÖKÜMAN DURUMU

- KONTROLLÜ KOPYA  
 KONTROLSÜZ KOPYA  
 İPTAL ...../...../.....